

Guía Rápida para Profesionales de la Salud

Antes de recibir el Holter

Descarga de la documentación

Lea atentamente la documentación relativa al uso del Holter de Parkinson STAT-ON.


- Manual de Usuario
- Guía de Interpretación de Informes
- Guía de Descarga de Informes

Todos los documentos se pueden descargar directamente desde la web:

<https://www.sense4care.com/es/soporte/>

Descarga de la APP STAT-ON

Desde Apple Store y/o Google Play, el Profesional de la Salud podrá descargar la aplicación móvil STAT-ON con reporte básico (3 páginas e info general). Para la versión de reportes extendidos (con toda la información diaria y de parámetros de la marcha) en Android, vaya a <https://www.sense4care.com/es/soporte/> y seleccione la versión que desee: reporte básico o extendido. Para la versión extendida en iOS consulte a support@sense4Care.com.

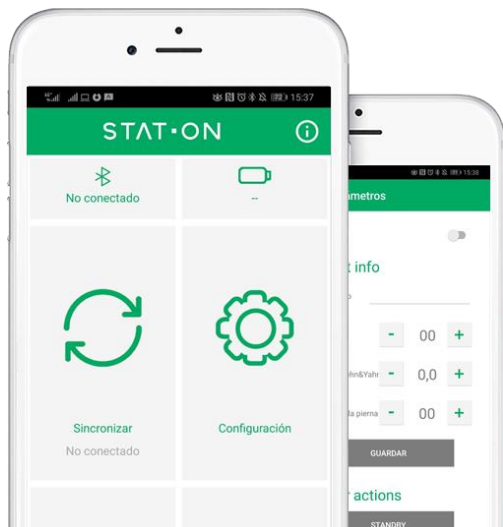

Siguiendo las instrucciones del Manual del Usuario, el Profesional configurará la aplicación STAT-ON en el dispositivo (Smartphone o Tablet) que vaya a utilizarla.

Después de recibir el Holter

Componentes del Kit STAT-ON

Sense4Care facilitará el Kit STAT-ON, el cual se compone de un dispositivo médico clase IIa, un cinturón bio-compatible, y opcionalmente una base de carga inalámbrica y un transformador AC.




1. Encender el Holter STAT-ON

Para encender el Holter por primera vez, presionar el botón verde. Su indicador LED debería parpadear en color blanco.



2. Emparejar el Holter con la APP

Consultar la Guía de inicio rápido en el **Manual de Usuario** para emparejar el Holter con el teléfono inteligente y configurarlo en pocos minutos.

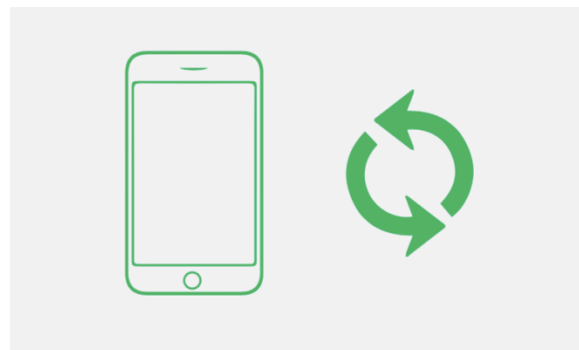


Antes de usarlo con un paciente

3. Asegúrese que el Holter está cargado

Antes de empezar una nueva monitorización, compruebe que la batería del Holter está completamente cargada. De este modo se garantiza cubrir todo el periodo de monitorización (entre 5 y 7 días, dependiendo de las horas al día) sin que haya ninguna incidencia o el Holter se quede sin batería. De esta forma, no requerirá proporcionar una base de carga al paciente, y tan solo deberá ocuparse de colocárselo por la mañana y quitárselo por la noche, o bajo condiciones puntuales y especificadas en el Manual de Usuario.

4. Colocar el Holter en el cinturón

Insertar el Holter como se muestra en la Figura, una ubicación u orientación incorrecta del Holter podría proporcionar resultados incorrectos.

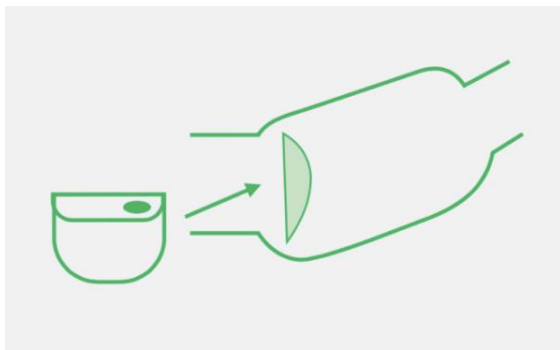

5. Colocar en el lado izquierdo

El cinturón debe ir colocado de modo que el Holter quede situado en el lado izquierdo de la cintura del paciente. Las luces LED deben quedar mirando hacia arriba. Una vez configure el sensor con la APP, el periodo de monitorización inicia y ya se puede salir de la APP.



Después del periodo de uso


6. Generar el Informe

Después del proceso de monitorización, ponga el sensor en la base de carga ya que estará descargado. Conecte el Holter con su APP y sincronice para generar el informe automáticamente y en unos pocos segundos (para más información consulte la **Guía de Descarga de Informes** disponible en la web).



7. Volver a cargar el Holter en su base

Coloque el sensor en el centro de la base del cargador. Se encenderá el LED naranja del sensor. Cuando acabe el proceso, este LED se apagará.

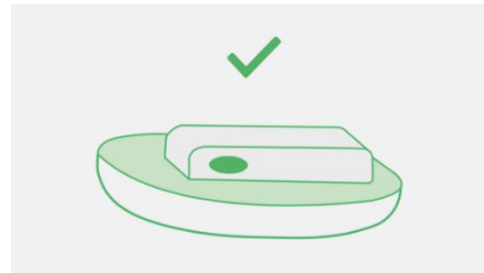

Observaciones:

En funcionamiento normal el LED del Holter parpadea en verde. Si el Holter está quieto esta luz se apagará, pero cuando se detecte movimiento, se encenderá de nuevo. Si apareciera un LED de color ROJO, el Holter tiene un error, y será necesario llamar al SAT de Sense4Care (93 492 39 59) o envíe un email a support@sense4care.com.

Recomendaciones básicas:

1. No llevar el Holter en transporte durante mucho tiempo.
2. Quitarse el Holter si se va a realizar deporte.
3. El paciente puede quitarse el sensor cuando desee.
4. No ducharse con el Holter.
5. No utilizar mientras se duerme por las noches.